



Numero principale del prodotto 199990537

ABENA®

Slip, ABENA Slip, XXL1, codice colore viola

- ✓ Traspirabilità a 360 gradi per una pelle sana e un comfort ottimale
- ✓ Tecnologia Top-Dry per una superficie asciutta che protegge la pelle
- ✓ Pannelli laterali flessibili per una vestibilità facile e ottimale
- ✓ Indicatore di umidità
- ✓ Controllo degli odori



Descrizione del prodotto

ABENA Slip Bariatric è il nostro slip protettivo per perdite urinarie per incontinenza da moderata a grave, progettato per persone con dimensione dei fianchi fino a 254 cm. I pannelli laterali flessibili con nastri in velcro assicurano una vestibilità facile e ottimale. I prodotti sono caratterizzati dalla tecnologia Top-Dry per il massimo comfort e cura della pelle ottimale. Lo slip offre traspirazione a 360 gradi nella zona della vita per garantire la completa traspirazione della pelle. Il sistema di controllo degli odori riduce al minimo gli odori sgradevoli. L'indicatore di umidità guida l'utilizzatore e il caretaker verso il prodotto con il livello di assorbimento adeguato e facilita il cambio del prodotto.



Specifications

Nome della base	Slip
Marchio	ABENA
Dimensioni	XXL1
Colore	Bianco
Caratteristiche	Codice colore viola
Materiale	Fluff ECF, PE, strato posteriore simile al tessuto (TBS), elastam, tessuto non tessuto, PP, resina, SAP
Lunghezza/profondità	1010 mm
Larghezza	699 mm
Dimensioni fianchi	170-254 cm
Tolleranza	+/- 10%
Test di assorbimento Rothwell	2250 ml
Genere	Unisex
Certificati	CE. MD. UKCA.
Classe CE (Dispositivi medicali)	Class I
Standard del prodotto o di test	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Direttive, regolamenti e leggi	MDR (EU) 2017/745
Istruzioni di sicurezza e avvertenze	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Durata a scaffale	5 anni
Istruzioni per la conservazione	Conservare in luogo asciutto, a temperatura ambiente e lontano dalla luce diretta del sole.
Istruzioni per lo smaltimento del prodotto	Può essere smaltito con i normali rifiuti domestici differenziati secondo le normative locali.
Istruzioni per lo smaltimento degli imballaggi	Può essere riciclato o incenerito.

Istruzioni per l'uso/applicazione

Slip protettivo per perdite urinarie per incontinenza da moderata a grave. È importante misurare sempre la circonferenza dei fianchi per scegliere la taglia giusta e il livello di assorbimento corretto per evitare perdite. Piegare gli slip nel senso della lunghezza con il retro rivolto verso l'esterno per creare una forma a scodella. Passare gli slip da davanti a dietro. Distendere la parte anteriore dello slip creando una forma a canale tra le gambe. Fissare i nastri in velcro su entrambi i lati per una vestibilità sicura e confortevole. Facile riconoscimento delle dimensioni del prodotto grazie a codici colore, nomi e sistemi di numerazione.

Packaging data

Unità	Contiene	Lunghezza	Larghezza	Altezza	EAN
collo	4 conf.	50 cm	24 cm	36 cm	5703538458675
conf.	10 pz	2.3 cm	17 cm	25 cm	5703538458637



Il Regolamento (UE) 2017/745 è una norma dell'Unione Europea che regola la ricerca clinica e la vendita di dispositivi medici per uso umano. Tale regolamento abroga la Direttiva 93/42/CEE, relativa ai dispositivi medici, e la Direttiva 90/385/CEE, relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi, dal 26 maggio 2021.



Il marchio CE garantisce la sicurezza e la conformità a tutte le precauzioni di sicurezza di un prodotto. CE è l'acronimo di "Conformité Européenne" (Conformità europea) e si trova principalmente su apparecchiature elettroniche e di sicurezza, prodotti da costruzione e dispositivi medici.



Il marchio UKCA garantisce che un prodotto è sicuro da usare e rispetta tutte le precauzioni di sicurezza in linea con gli standard del prodotto e la legislazione del Regno Unito.



Pannelli laterali flessibili con elastici aggiunti per una facile applicazione. Una vestibilità aderente e sicura adatta a corpi di qualsiasi forma.



Il sistema anti-odore è un fattore fondamentale per garantire discrezione per l'utente. I prodotti per l'incontinenza di ABENA sono pensati e realizzati per garantire che dal prodotto provenga il minimo odore possibile.



L'indicatore di umidità è una striscia sensibile ai liquidi che cambia colore o sbiadisce, indicando così quando è il momento di cambiare il prodotto.



Il prodotto non contiene lattice.



Sistema che indica l'assorbimento in base al numero di gocce. Maggiore è il numero di gocce indicato, maggiore è l'assorbimento. Varia da 1 a 9 gocce.



Esclusiva tecnologia Top Dry che fornisce un rapido assorbimento e garantisce una superficie asciutta anche dopo molteplici minzioni.

